



Sistema monouso UNO™

Una nuova idea di NPWT portatile con canister
che garantisce 15 giorni di terapia



UNO™

Soluzione mobile monouso che fornisce 15 giorni di terapia a pressione negativa

I benefici della pressione negativa in un sistema monouso completo di contenitore di raccolta essudato, medicazioni di diverse forme e misure e 15 giorni di durata.

Terapia personalizzabile grazie alla possibilità di erogare 2 livelli di pressione (80 e 125 mmHg) in modalità continua o intermittente. Sicuro, perché controllato da 3 allarmi sonori e visivi (batteria scarica, perdita circuito e contenitore pieno).

DESCRIZIONE PRODOTTO

Unità UNO™

- Piccolo, le sue dimensioni sono di soli 7,6 x 11,2 x 6 cm
- Leggero, il suo peso è di appena 400 grammi
- Durata di 15 giorni
- Garantisce l'erogazione della pressione sia in modalità continua che in modalità variabile:
 - modalità continua: a 80 mmHg o 125 mmHg;
 - modalità variabile: a 80 mmHg / 30 mmHg e 125 mmHg / 30 mmHg
- Fornito di 3 allarmi sonori e visivi (batteria scarica, perdita circuito e contenitore pieno).



Canister di raccolta

- Fornito di canister di raccolta da 70 ml.
- Facile connessione alla pompa.
- Permette la raccolta e l'eliminazione dell'essudato in modo sicuro.

Medicazioni

- Ampia gamma di medicazioni per il trattamento post-operatorio delle ferite
- Tutte le medicazioni sono fornite di un morbido port di connessione per una facile applicazione
- Superficie a contatto col paziente in adesivo al gel di silicone morbido per una facile e atraumatica rimozione
- Se necessario, la medicazione può essere riposizionata
- La medicazione assorbe l'essudato e fa passare quello in eccesso nel canister
- La medicazione assorbe l'essudato fino a 6 volte il peso della medicazione stessa.

FUNZIONAMENTO

- Possibilità di regolare la pressione sia in modalità continua che in modalità intermittente, migliorando la possibilità di scelta dell'operatore
- Il sistema garantisce una veloce guarigione della ferita
- UNO™ permette di gestire l'essudato in eccesso attraverso la medicazione, facendolo passare al canister
- È di facile applicazione e può essere rimosso o riposizionato senza problemi, minimizzando i danni alla cute anche in caso di pelle fragile o delicata.

KIT

Il sistema UNO™ viene fornito provvisto di:

- 1 unità UNO™;
- 2 canister (70 ml);
- 4 strisce adesive in silicone;
- 5 medicazioni, ognuna provvista di morbido port di connessione;
- 2 batterie tipo AA (sostituibili).

CODICE	DESCRIZIONE
U-S0005	Sistema a pressione negativa monouso UNO (solo motore)
U-C070	Canister 70ml
UNO-0408	Medicazione UNO™ mis. 10x20 cm
UNO-0608	Medicazione UNO™ mis. 15x20 cm
UNO-0412	Medicazione UNO™ mis. 10x30 cm
UNO-0416	Medicazione UNO™ mis. 10x40 cm
UNO-0606	Medicazione UNO™ mis. 15x15 cm
UNO-0612	Medicazione UNO™ mis. 15x30 cm
UNO-0808	Medicazione UNO™ mis. 20x20 cm
UNO-1010	Medicazione UNO™ mis. 25x25 cm
UNO-0810	Medicazione UNO™ mis. 20x25 cm
U-000A2	Borsa da trasporto
U-S1020-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 10x20 cm
U-S1520-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 15x20 cm
U-S1030-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicaizoni 10x30 cm
U-S1040-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 10x40 cm
U-S1515-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 15x15 cm
U-S1530-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 15x30 cm
U-S2020-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 20x20 cm
U-S2525-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 25x25 cm
U-S2025-5	Kit Sistema monouso UNO™ con medicazioni 20x25 cm



- **Facile e veloce da programmare.**
- **Di piccole dimensioni, discreto e di facile utilizzo - migliora la qualità di vita del paziente e la sua indipendenza.**
- **Display chiaro e visibile - indicazione della pressione e dello stato della batteria.**
- **Facile e veloce applicazione della medicazione, che può essere riposizionata senza problemi, se necessario.**



GENADYNE

Genadyne Biotechnologies Inc. è un'azienda statunitense che sviluppa e produce sistemi per la terapia a pressione negativa, sistemi terapeutici antidecubito e soluzioni wifi per telemedicina. La sede è a Hicksville NY. Genadyne commercializza i suoi prodotti negli Stati Uniti ed in più di 20 paesi in tutto il mondo. La missione di Genadyne è quella di promuovere la guarigione delle ferite, di far diminuire il ripresentarsi di tali lesioni e di mantenere la dignità, l'indipendenza, il comfort e la riduzione del dolore del paziente tramite i suoi prodotti e la formazione costante. Grazie al suo Reparto di Ricerca e Sviluppo Genadyne è stata in grado di creare strumenti tra i più avanzati ed economicamente efficaci nel settore della salute.

Per maggiori informazioni:
www.genadyne.com




AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore "healthcare". La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockholm, Large Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.

La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi offerti dalle aziende del Gruppo include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione.

Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.

AddLife ha due aree di business denominate "Labtech" e "Medtech" ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.

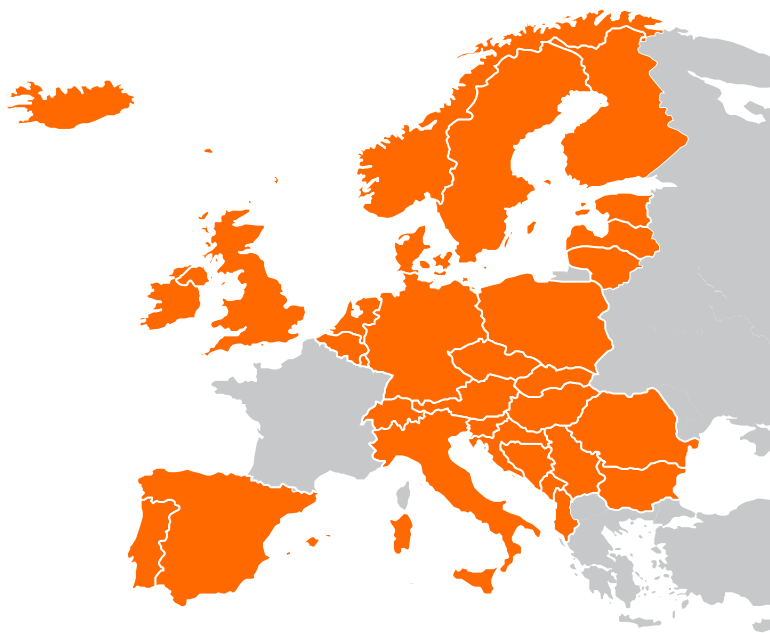

VISIONE

Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.



MISSION

AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti nel settore dell'healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. AddLife offre soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.



VALORI

Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovatività.

Il successo di AddLife si basa su una cultura aziendale ben supportata in tutto il Gruppo. I valori sono i principi guida nella vita quotidiana di tutti i dipendenti, indipendentemente dal paese in cui operano.

I NOSTRI PIÙ SIGNIFICATIVI VANTAGGI COMPETITIVI

AddLife possiede e sviluppa aziende che migliorano la qualità della vita, riducono la sofferenza dei pazienti e producono benefici sociali. Per realizzare questa visione, offriamo alle aziende del nostro Gruppo soluzioni competitive che soddisfano le esigenze dei clienti sia a breve che a lungo termine.



Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AddLife Development AB
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791
info@biomedica-italia.it - biomedica_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:
Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2025 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.